



ВИТЯЗЬ®

**КОМПЛЕКС ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ОТРАБОТАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ К100П-ДМ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СКЖИ.941153.002 РЭ**



Настоящий документ (далее по тексту - РЭ) предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы, содержит описание работы изделия и устанавливает правила хранения, гарантийного ремонта и технического обслуживания комплекс обезвреживания отработанных медицинских изделий (в дальнейшем комплекс обезвреживания).

РЭ предназначено для обслуживающего персонала, прошедшего специальную подготовку по обслуживанию и техническому использованию данного оборудования.

В случае передачи комплекса обезвреживания в другое место для эксплуатации или выполнения какого-либо вида ремонта, РЭ подлежит передаче вместе с комплексом обезвреживания.

Записи, вносимые отделом технического контроля, должны быть заверены печатью. Не заверенные подписью исправления не допускаются.

Примечание - конструкция комплекса обезвреживания может иметь изменения не отраженные в настоящем издании.

1 Описание и работа

1.1 Описание и работа изделия

Комплекс обезвреживания предназначен для применения в лечебно-профилактических учреждениях (далее по тексту ЛПУ) при организации децентрализованного метода обезвреживания медицинских отработанных изделий и в пунктах или центрах по обезвреживанию при организации централизованного метода (групп ЛПУ на территории города или района).

Отработанные медицинские изделия – одноразовые и многоразовые (не подлежащие дальнейшему использованию) медицинские изделия, образовавшиеся в организациях при приготовлении и использовании цитостатических лекарственных средств, загрязненные кровью, иными биологическими жидкостями и (или) контактировавшие со слизистой оболочкой и (или) поврежденной кожей организма человека.

Сбор, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация отходов осуществляется с соблюдением требований Санитарных правил в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на человека и среду обитания человека.

В состав комплекса обезвреживания отработанных медицинских изделий К100П-ДМ входят:

- Обеззараживатель паровой ОП100ГК;
- Деструктор механический ДМ01.

Комплекс обезвреживания эксплуатируют в стационарных отапливаемых помещениях (при температуре окружающей среды от 10 °С до 35 °С, относительной влажности 80 % при 25 °С).

Комплекс обезвреживания соответствует требованиям ГОСТ 15150-69 УХЛ 4.2 по виду климатического исполнения и ГОСТ 20790-93 группы 1 по механическим воздействиям. В соответствии с ГОСТ 20790-93 в зависимости от последствий отказа в процессе использования относится к классу В.

Комплекс обезвреживания является объектом повышенной опасности и требует соблюдения действующих правил:

СНиП «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07.02.2018 №14;

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителем»;

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

Средний срок эксплуатации комплекса обезвреживания – 10 лет.

Продолжительная эксплуатация и сохранность комплекса обезвреживания зависят от правильной подготовки изделий к обезвреживанию, регулярного ухода за комплексом обезвреживания.

Пример записи комплекса обезвреживания при заказе:

Комплекс обезвреживания К100П-ДМ ТУ ВУ 300031652.137 - 2023

1.2 Комплектность

1.2.1. Комплектность поставки комплекса обезвреживания в соответствии с таблицей 1.1

Таблица 1.1

Модель	Наименование	Обозначение	Количество
К100П-ДМ	Обеззараживатель паровой ОП100ГК	СКЖИ.942711.022	1
	Деструктор механический ДМ01	СКЖИ.613235.001	1
	Упаковка обеззараживателя ОП100ГК	СКЖИ.305639.094	1
	Упаковка деструктора ДМ01	СКЖИ.305649.261	1
	<u>Эксплуатационная документация</u>		
	- Руководство по эксплуатации обеззараживателя ОП100ГК	СКЖИ.942711.022 РЭ	1
	- Паспорт обеззараживателя ОП100ГК	СКЖИ.942711.022 ПС	1
	- Руководство по эксплуатации деструктора ДМ01	СКЖИ.613235.001 РЭ	1
	- Паспорт деструктора ДМ01	СКЖИ.613235.001 ПС	1
	<u>Комплект принадлежностей</u>		
Полка	СКЖИ.305646.079	1	
Бумага термочувствительная в рулоне, шириной 57-58мм, диаметром 35мм	СКЖИ.304121.001	1	

Внимание!

Сведения о конструкции, принципе действия, основных технических характеристиках и требований, необходимых для правильной и безопасной эксплуатации составных частей комплекса обезвреживания К100П-ДМ изложены в руководстве по эксплуатации обеззараживателя ОП100ГК и в руководстве по эксплуатации деструктора ДМ01.

Невыполнение этих требований приведет к отказу в гарантийном обслуживании.



Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Витязь»

ул. П. Бровки, 13а, 210605, г. Витебск,

тел./факс: +375-(212)-26-48-53

www.vityas.com

e-mail: alternative@vityas.com